



PROPONOWANE TECHNIKI  
INIEKCJI

[www.ellanse.com](http://www.ellanse.com)

## WSTĘP

Przedyskutuj z pacjentem obszar/obszary, które mają być korygowane

- W celu opracowania takiego planu terapeutycznego, który zagwarantuje sukces omów i wyjaśnij obecne oraz przyszłe opcje za biegiowe.
- Dopilnuj, aby pacjent wypełnił i podpisał formularz informacyjny zawierający zgodę pacjenta na zabieg.
- Pamiętaj o zrobieniu zdjęć przed i po zabiegu, następnie dodaj je do akt pacjenta w celu późniejszego porównywania.
- Zdezynfekuj obszar podlegający zabiegowi.
- Aby zredukować niepokój pacjenta i uczynić zabieg bardziej komfortowym zastosuj odpowiedni środek znieczulający. Powierzchniowy środek znieczulający i/lub znieczulenie miejscowe jest jak najbardziej odpowiednie.
- Wyjmij strzykawkę zawierającą Ellansé™ ze sterylnego opakowania. W celu uniknięcia niepotrzebnej straty preparatu zacznij od wyjęcia tylko jednej strzykawki.
- Adekwatnie do obszaru zabiegowego ruchem wstecznym powoli pozostawiaj cienkie nitki produktu, tworząc wielokrotne kanały.
- Dopuszczalne techniki wprowadzania preparatu to: technika liniowa z wstecznym pozostawieniem preparatu, technika wachlarzowa i technika krzyżowa.
- Po iniekcji, żeby wyrównać ewentualne nierówności, delikatnie rozmasuj miejsca korekcji.
- Krok po kroku doprowadź pacjenta do efektu pełnej korekty, unikaj nadkorekcji.
- Ellansé™ jest preparatem jednorazowego użytku. W celu uzyskania dalszych informacji skorzystaj z IFU.


## BRUZDY PRZEDNIEJ CZĘŚCI ŻUCHWY

- Wprowadź igłę w tkankę podskórną, zastosuj technikę wachlarzową (patrz rysunek)
- Wykonaj iniekcję liniami krzyżującymi się, zacznij po przeciwnej stronie w stosunku do wcześniejszego miejsca wkłucia
- Delikatnie rozmasuj w celu uzyskania pożądanego rezultatu używając kciuka lub palca wskazującego
- Można również zastosować technikę wachlarzową przy pomocy długiej igły, miejsce wprowadzenia igły znajduje się wtedy dalej od miejsca korekty



### BRUZDY NOSOWO-WARGOWE

- Wprowadź igłę głęboko do skóry właściwej/tkanki podskórnej
- Wstrzyknij produkt używając techniki wachlarzowej, wykonując iniekcję w trakcie wycofywania igły; bądź zawsze przyśrodkowo w stosunku do fałdu nosowo-wargowego korygowanej strony
- Dla głębszych bruzd, w celu lepszego efektu wypełnienia, produkt może być wprowadzony wielowarstwowo
- W przypadku konieczności wypełnień ubytków wokół ust technika wachlarzowa może być połączona z/lub zastąpiona przez wstrzyknięcie małych bolusów preparatu w głębsze warstwy skóry w linii prostopadłej do ubytku
- Delikatnie rozmasuj w celu uzyskania równomiernego rozmieszczenia produktu, używając kciuka i palca wskazującego

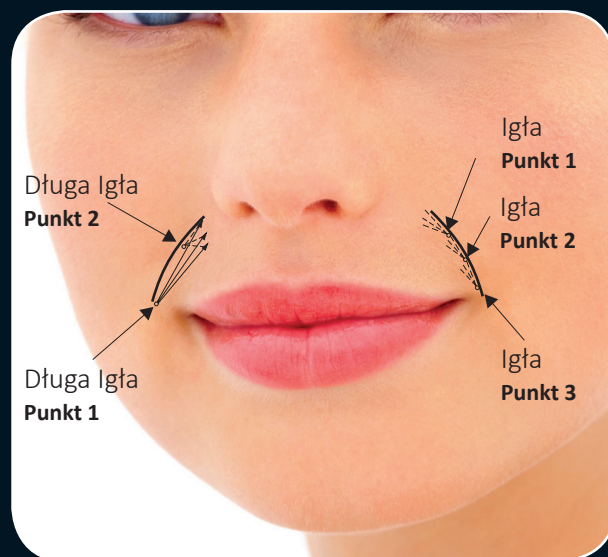


### LINIE „MARIONETKI”

- Wprowadź igłę głęboko do skóry właściwej/tkanki podskórnej, lekko przyśrodkowo do korygowanej linii marionetki
- Wstrzyknij produkt używając techniki wachlarzowej, ale zawsze przyśrodkowo do linii wypełnianej zmarszczki, tak aby unieść wgłębienie
- Ponownie wprowadź igłę pod kątem rozwartym w stosunku do poprzedniego wkłucia i użyj techniki krzyżowej w celu wsparcia uniesienia korygowanego obszaru
- Delikatnie rozmasuj w celu równomiernego rozłożenia produktu używając kciuka lub palca wskazującego
- Można również zastosować technikę wachlarzową przy pomocy długiej kaniuli, miejsce wprowadzenia igły znajduje się wtedy dalej od miejsca korekty




### KĄCIKI UST

- Pierwsze wprowadzenie igły jest lekko boczne i poniżej kącika ust
- Przy lekko otwartych ustach wprowadź igłę w tkankę podskórną
- Zastosuj technikę liniową wsteczną, znajduj się pod korygowanym ubytkiem
- W celu dodatkowego wzmocnienia, można zastosować drugie wejście, techniką krzyżową poniżej kącika ust, idąc w kierunku bardziej przyśrodkowym
- Unikaj nadkorekcji, ponieważ doprowadzi to do nadmiernego uniesienia skóry w kąciku ust
- Stosownie do potrzeb, delikatnie rozmasuj kciukiem lub palcem wskazującym

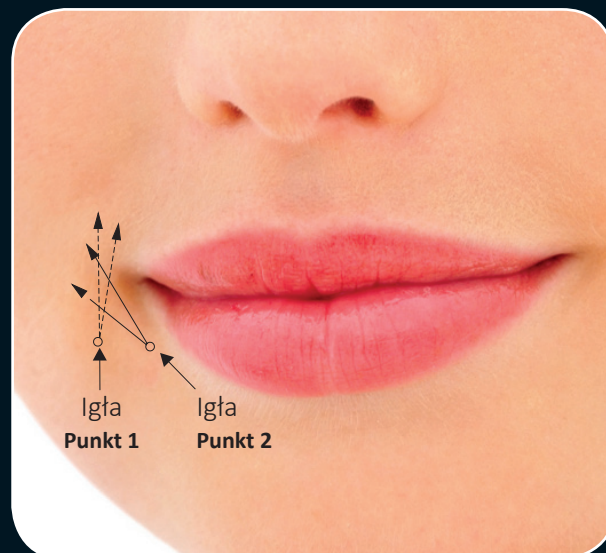


### UNIESIENIE ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI BRWI

- Żeby zapobiec wprowadzeniu produktu poniżej linii oczodołu położyć palec na górnym brzegu oczodołu
- Wprowadź igłę w najbardziej boczną część brwi i idź głęboko na okostną
- Użyj techniki wachlarzowej tworząc dwie lub trzy linie produktu
- Nie przekraczaj 1/3 długości linii brwi (patrz rysunek); bądź ostrożny, nie podawaj dawki powyżej 0,25 ml na stronę
- Delikatnie rozmasuj w celu uzyskania pożądanego efektu

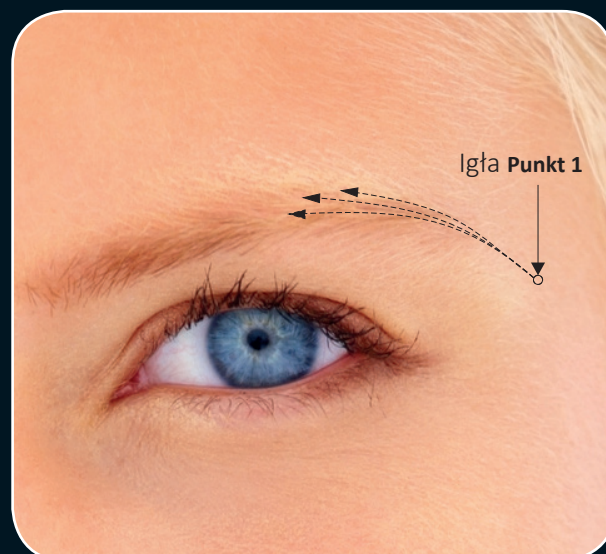


### DÓŁ SKRONIOWY

- Wprowadź igłę od zewnątrz brzegu oczodołu powyżej łuku jarzmowego
- Wprowadź produkt pomiędzy tkankę podskórną i warstwę powięzi skroniowej mięśnia skroniowego
- W celu uniknięcia podaży preparatu do naczynia krwionośnego, dokonaj aspiracji strzykawki
- Delikatnie rozmasuj w celu uzyskania pożądanego efektu

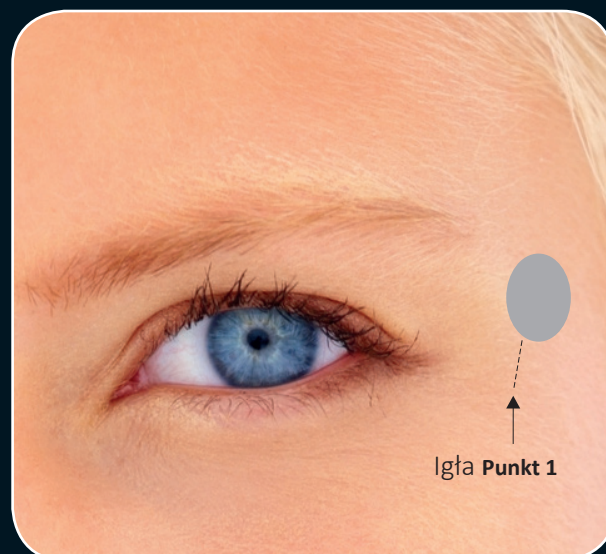


### BRUZDA BRÓDKOWA

- Wprowadź igłę bocznie do ubytku (patrz rysunek)
- Sprawdź czy bruzda nie jest przyrośnięta do głębszych warstw skóry. Aby uwolnić ewentualne zrosty użyj technik podcięcia bruzdy
- Wprowadź produkt w tkankę podskórną. Żeby unieść bruzdę bródkową użyj techniki liniowej
- Powtórz czynność po przeciwnej stronie bruzdy
- Delikatnie rozmasuj

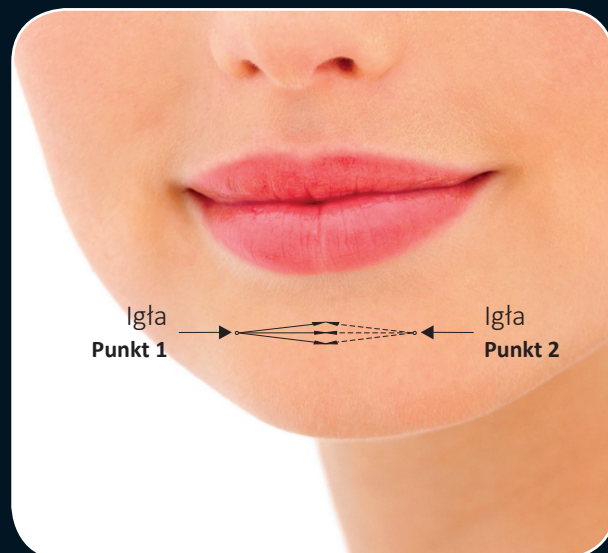


### POWIĘKSZANIE PODBRÓDKA

- Wprowadź produkt w tkankę podskórną używając techniki wachlarzowej
- Powtórz czynność po przeciwnej stronie bródky
- Aby uzyskać pożądany rezultat ukształtuj wprowadzony produkt
- Można również zastosować technikę wachlarzową przy pomocy dłuższej igły, miejsce wprowadzenia igły znajduje się wtedy dalej od miejsca korekty

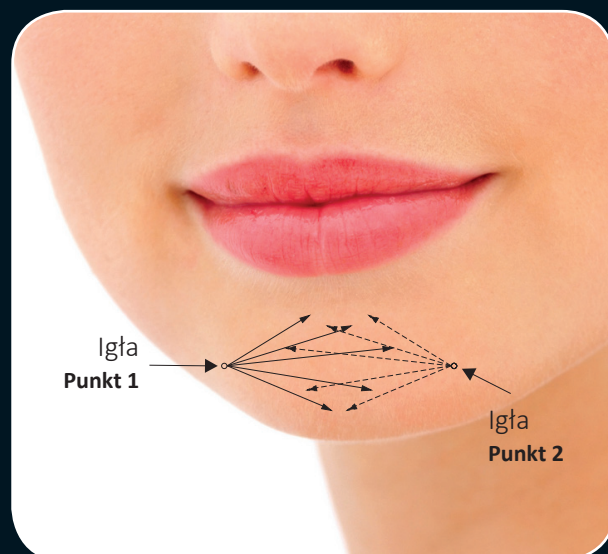


### POWIĘKSZANIE POLICZKA

- Wprowadź igłę w tkankę podskórną, głęboko nad okostną (patrz rysunek)
- Wprowadź produkt używając techniki wachlarzowej
- W celu dalszego zwiększenia objętości wypełnianego obszaru użyj techniki krzyżowej (patrz rysunek)
- Objętość podawanego preparatu może być przewidziana do zastosowania jednorazowego lub może być uzupełniana podczas kolejnych wizyt kontrolnych
- Aby uzyskać pożądany rezultat delikatnie rozmasuj korygowany obszar

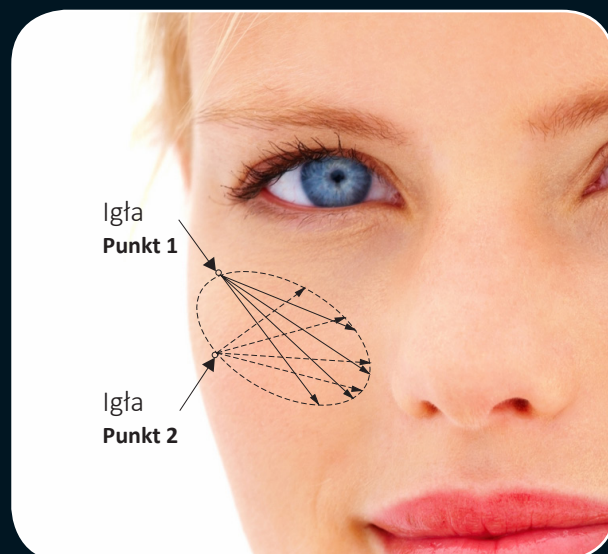


### WYPEŁNIENIE PONIŻEJ KOŚCI JARZMOWEJ

- Żeby zwiększyć objętość policzka poniżej kości jarzmowej wykorzystaj tkankę podskórną. Stosuj technikę wachlarzową i/ lub krzyżową
- Pozostawienie większej ilości warstw zapewni lepsze wsparcie strukturalne
- Delikatnie rozmasuj, żeby uzyskać pożądany rezultat
- Można również zastosować technikę wachlarzową przy pomocy dłuższej igły

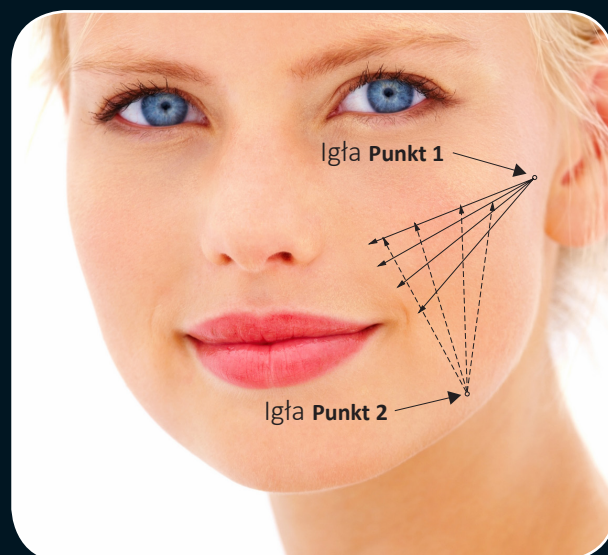


### ZMARSZCZKI NAD GÓRNĄ WARGĄ

- Wprowadź igłę w tkankę podskórną powyżej linii wargowej górnej wargi
- Użyj techniki wachlarzowej, wprowadź 2-3 linie produktu
- Nigdy nie przechodź poza brzeg filtrum, pozostań ponad granicą czerwieni wargowej
- Jeśli jest taka potrzeba delikatnie rozmasuj

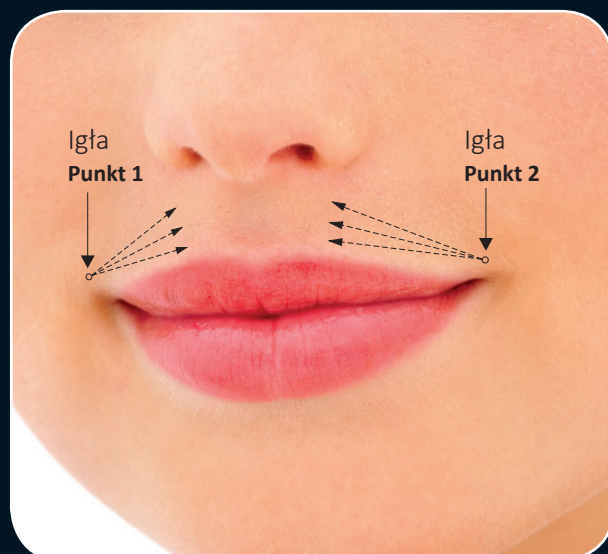

### DŁONIE

- W celu ułatwienia zaznacz struktury anatomiczne: naczynia krwionośne i ścięgna
- Unieś skórę po stronie grzbietowej dłoni, we wskazanych na obrazku punktach, wykonaj znieczulenie miejscowe stosując małe dawki lidokainy
- W te same obszary skóry wprowadź małe ilości Ellansé™ używając techniki bolusa
- Rozmasuj, żeby rozprowadzić produkt równomiernie
- Jeśli masz doświadczenie, możesz zastosować iniekcję z odległego punktu znajdującego się na nadgarstku, używając długiej kaniuli

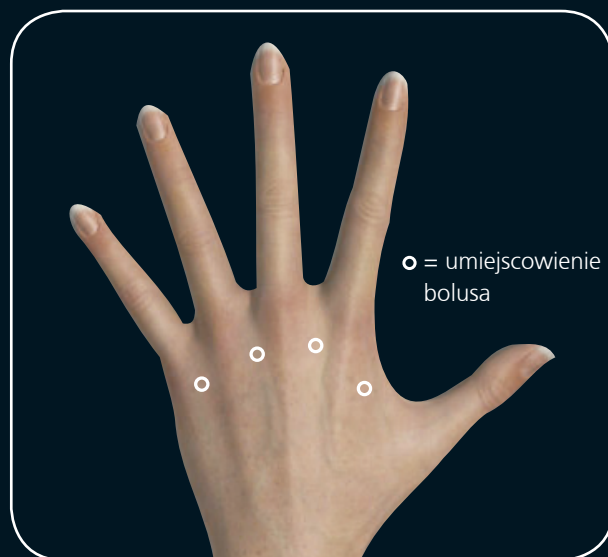

This image shows a single page from a lined notebook. The page is white with horizontal lines spaced evenly down its length. The notebook's cover is a dark navy blue, and the spine on the left is a light, muted blue. The page has rounded corners on the right side. There are no markings, text, or drawings on the page.



ELLANSÉ™  
*A touch of youth*

AQTIS Medical BV  
Yalelaan 44  
3584 CM Utrecht

PO Box 85216  
3508 AE Utrecht  
The Netherlands

Tel : +31 30 253 1901  
Fax : +31 30 253 1743

Email: [info@aqtismedical.com](mailto:info@aqtismedical.com)  
Website: [www.aqtismedical.com](http://www.aqtismedical.com)

AQTIS Medical™ jest prywatną firmą z głównym biurem w Holandii z urządzeniami/preparatami medycznymi, która specjalizuje się w badaniach badawczo - rozwojowych, produkcji i sprzedaży innowacyjnych urządzeń/preparatów medycznych do wstrzyknięć. STAT Technology™ zawiera unikalny zestaw bioresorbowalnych medycznych polimerów i formuły na nośniki żelowe.

Wyróżniającą cechą firmy AQTIS Medical™ jest jej kompetencja w zakresie modyfikacji i funkcjonowania tychże bioresorbowalnych polimerów oraz żelowych nośników w kontekście długości trwania efektów zabiegu i innych cech szczególnych wymaganych w kontekście efektów przeprowadzanej terapii.



**WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR  
ELLANSÉ™ W POLSCE:**

AESTHETIC CONCEPT  
ul. Zawiszy 6 lok 69  
01-167 Warszawa  
[biuro@aestheticconcept.pl](mailto:biuro@aestheticconcept.pl)



**AQTIS**   
Medical

Innovative Bioresorbable Solutions

[www.aestheticconcept.pl](http://www.aestheticconcept.pl)

[www.ellanse.com](http://www.ellanse.com)